

Gebrauchshinweise DAF

Lesen Sie diese Information sorgfältig durch und heben Sie sie auf.
Beachten Sie unbedingt alle erhaltenen Hinweise!

Ihre Fußbettungen wurden speziell für Sie gefertigt und vor Abgabe eingehend geprüft. Behandeln Sie sie bitte sorgfältig. **Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.**

- Prüfen Sie Ihre Fußbettungen vor jedem Tragen auf einwandfreie Funktion und Passform
- Wir empfehlen folgende Einlaufzeiten:
 1. Tag (Vormittag) = max. 10 Min.
 1. Tag (Nachmittag) = 15 – 20 Min.
 2. Tag (Vormittag) = 30 – 60 Min.
 2. Tag (Nachmittag) = 60 – 120 Min.
 3. Tag (Vormittag) = bis 180 Min.
- Wenn keinerlei Probleme aufgetreten sind, ist ab dem Mittag des 3. Tages zeitlich unbegrenztes Tragen möglich
- Kontrollieren Sie direkt nach jedem Tragen zusätzlich beide Füße ohne Strümpfe; nehmen Sie ggf. für Ferse und Fußsohle einen Spiegel zu Hilfe
- Die Fußbettungen wurden von uns in speziell dafür geeignete Schuhe eingepasst. Verwenden Sie nur diese. Andere Schuhe können eine andere Passform aufweisen und Druckstellen verursachen.
- Setzen Sie beim Anziehen der Schuhe die Ferse auf und drücken Sie den Fuß so weit wie möglich nach hinten, um einen zu losen Sitz zu vermeiden. Vermeiden Sie Strumpf- und Futterfalten
- Schließen Sie beim Anziehen der Schuhe alle Schnürungen und Verschlüsse gleichmäßig.
- Benutzen Sie zum Reinigen keine scharfen oder ätzenden Mittel. Wischen Sie bei Bedarf die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie die Einlagen an der Raumluft trocknen. Eine optionale Desinfektion kann mit üblichen Flächendesinfektionsmitteln erfolgen.
- Trocknen Sie die Fußbettungen bei Durchfeuchtung langsam aber nie auf Heizungen, Öfen oder in direktem Sonnenlicht.
- Nehmen Sie Änderungen bzw. Reparaturen in keinem Fall selbst vor.

Entsorgen Sie das Produkt nach bestimmungsgemäßem Gebrauch im Hausmüll oder bringen Sie es zur fachgerechten Entsorgung bei uns vorbei.

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an: 06831-3631. Wir helfen gerne!



Auf Schmidt und Tritt Vertrauen