

Gebrauchshinweise Einlagen

Lesen Sie diese Information sorgfältig durch und heben Sie sie auf.
Beachten Sie unbedingt alle erhaltenen Hinweise!

Ihre Einlagen wurden speziell für Sie gefertigt und vor Abgabe eingehend geprüft. Behandeln Sie sie bitte sorgfältig. **Sollten dennoch einmal Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.**

- Prüfen Sie Ihre Einlagen vor jedem Tragen auf einwandfreie Funktion und Passform
- Wir empfehlen folgende Einlaufzeiten:
 1. Tag (Vormittag) = max. 10 Min.
 1. Tag (Nachmittag) = 15 – 20 Min.
 2. Tag (Vormittag) = 30 – 60 Min.
 2. Tag (Nachmittag) = 60 – 120 Min.
 3. Tag (Vormittag) = bis 180 Min.
- Wenn keinerlei Probleme aufgetreten sind, ist ab dem Mittag des 3. Tages zeitlich unbegrenztes Tragen möglich
- Die Einlagen wurden von uns in Ihre dafür geeignete Schuhe eingepasst. Nur in diesen Schuhen können sie die geplante Wirksamkeit erreichen. Andere Schuhe können eine andere Passform aufweisen und hierdurch zu ungeplanten Veränderungen führen.
- Setzen Sie beim Anziehen der Schuhe die Ferse auf und drücken Sie den Fuß so weit wie möglich nach hinten, um einen zu losen Sitz zu vermeiden. Vermeiden Sie Strumpf- und Futterfalten
- Schließen Sie beim Anziehen der Schuhe alle Schnürungen und Verschlüsse gleichmäßig.
- Benutzen Sie zum Reinigen keine scharfen oder ätzenden Mittel. Wischen Sie bei Bedarf die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie die Einlagen an der Raumluft trocknen. Eine optionale Desinfektion kann mit üblichen Flächendesinfektionsmitteln erfolgen.
- Trocknen Sie die Einlagen bei Durchfeuchtung langsam aber nie auf Heizungen, Öfen oder in direktem Sonnenlicht.
- Nehmen Sie Änderungen bzw. Reparaturen in keinem Fall selbst vor.

Entsorgen Sie das Produkt nach bestimmungsgemäßem Gebrauch im Hausmüll oder bringen Sie es zur fachgerechten Entsorgung bei uns vorbei.

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an: 06831-3631. Wir helfen gerne!



Auf Schmidt und Tritt Vertrauen